

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LA MUESTRA



1. ABRIR EL TAPÓN desenroscando en el sentido contrario a las agujas del reloj.



2. Coloque el tapón BOCA ABAJO sobre una superficie limpia.



3. NO TOCAR las superficies internas del envase y del tapón.



4. Recogida de la muestra de orina. LLENAR EL RECIPIENTE hasta 3/4 de su capacidad.



5. GIRAR EL TAPÓN firmemente en el sentido de las agujas del reloj para sellarlo.



6. AGITAR SUAVEMENTE la muestra antes de transferirla al tubo.



7. LEVANTAR PARCIALMENTE LA ETIQUETA de protección (NO retirarla completamente).



8. INTRODUCIR EL TUBO. Aplique presión suavemente. Mantener el tubo hasta que esté lleno.



9. RETIRAR el tubo y volver a pegar completamente la etiqueta protectora.



10. ENTREGAR el tubo con la muestra en CONSULTA de ENFERMERÍA.